


Avoir un dossier ou CD Kodak


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	04/06/2014 10:22	Dossier de fichiers
kodak	03/08/2014 08:36	Dossier de fichiers
La cie	12/05/2014 18:56	Dossier de fichiers
Lecteur	04/10/2010 16:45	Dossier de fichiers
Logos	03/08/2014 11:31	Dossier de fichiers
Logosb	29/07/2014 10:30	Dossier de fichiers
Meafes	15/05/2014 10:30	Dossier de fichiers

Type : Dossier de fichiers
 Modifié le : 03/08/2014 08:36
 Taille : 692 Mo
 Dossiers : Support
 Fichiers : Autorun, DISSuiteSetup


le décompacter sur le bureau (décompacter)
 et lancer le setup

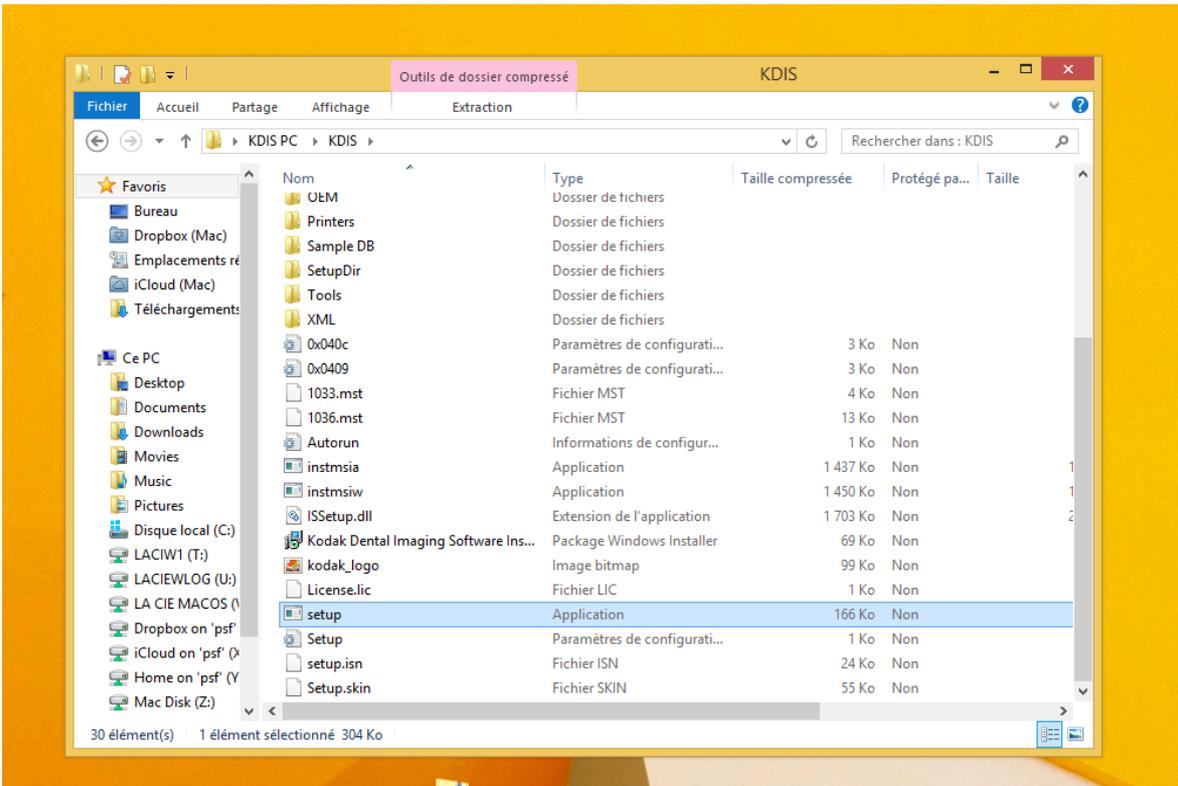


le setup va décompacter les fichiers nécessaires à l'installation

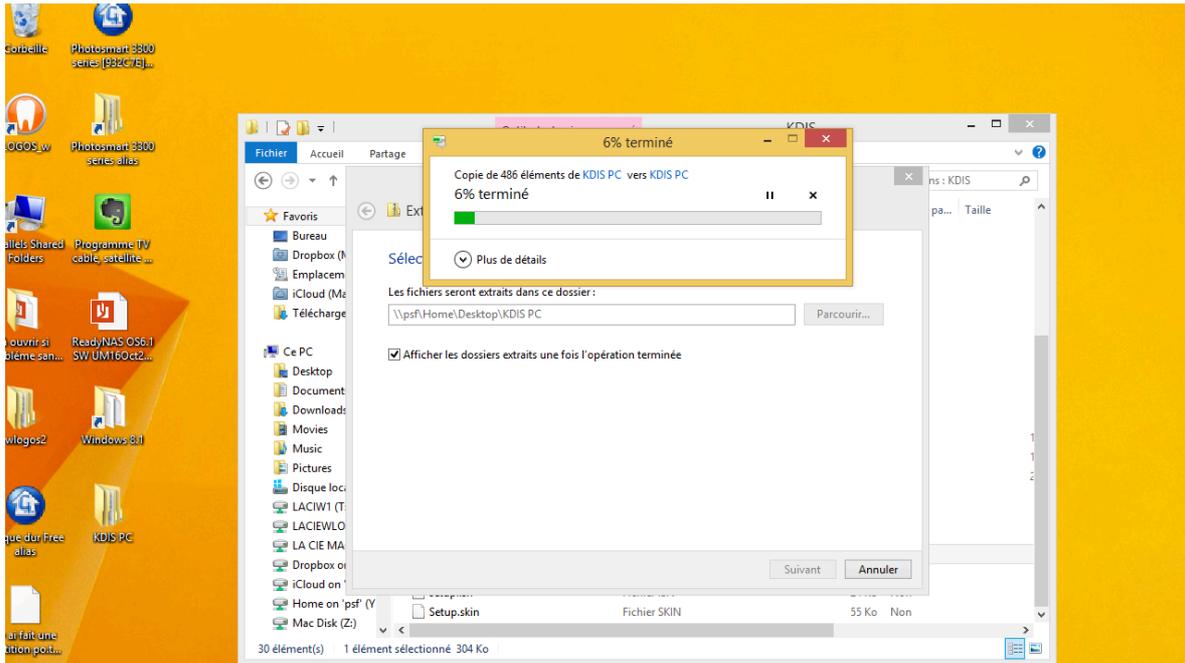


lancer setup et autoriser win defender ou antivirus

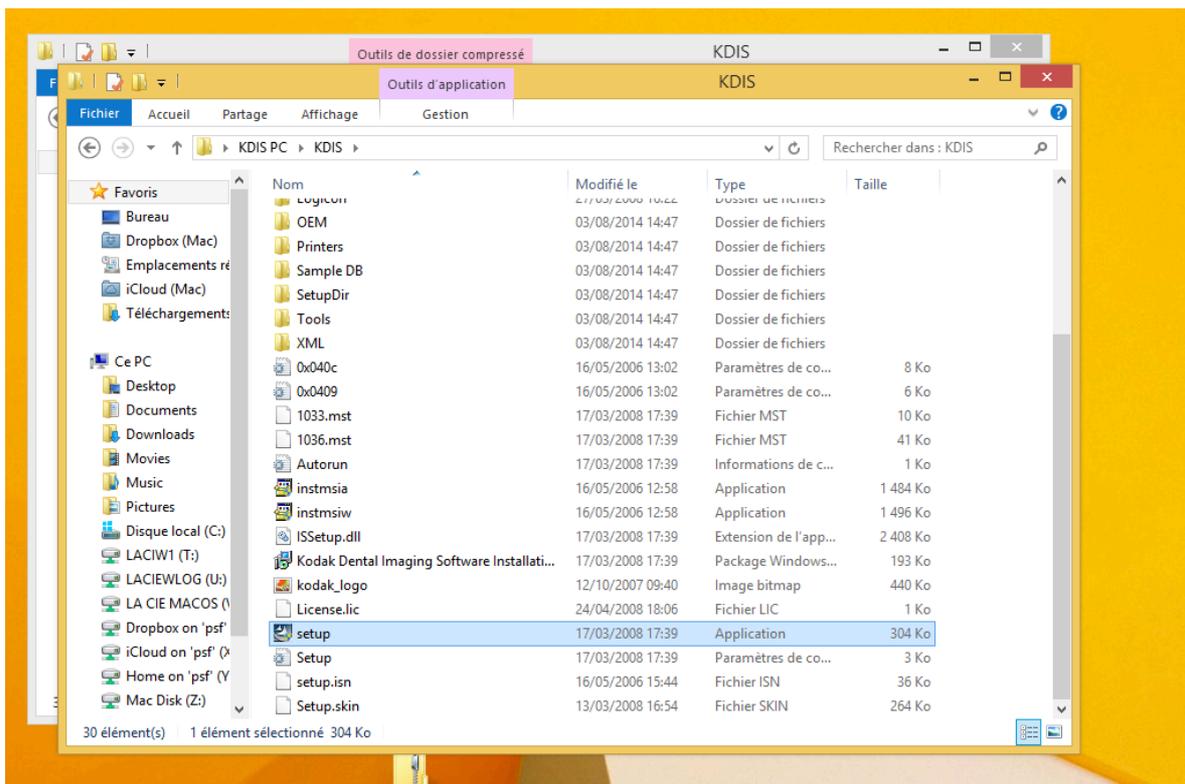


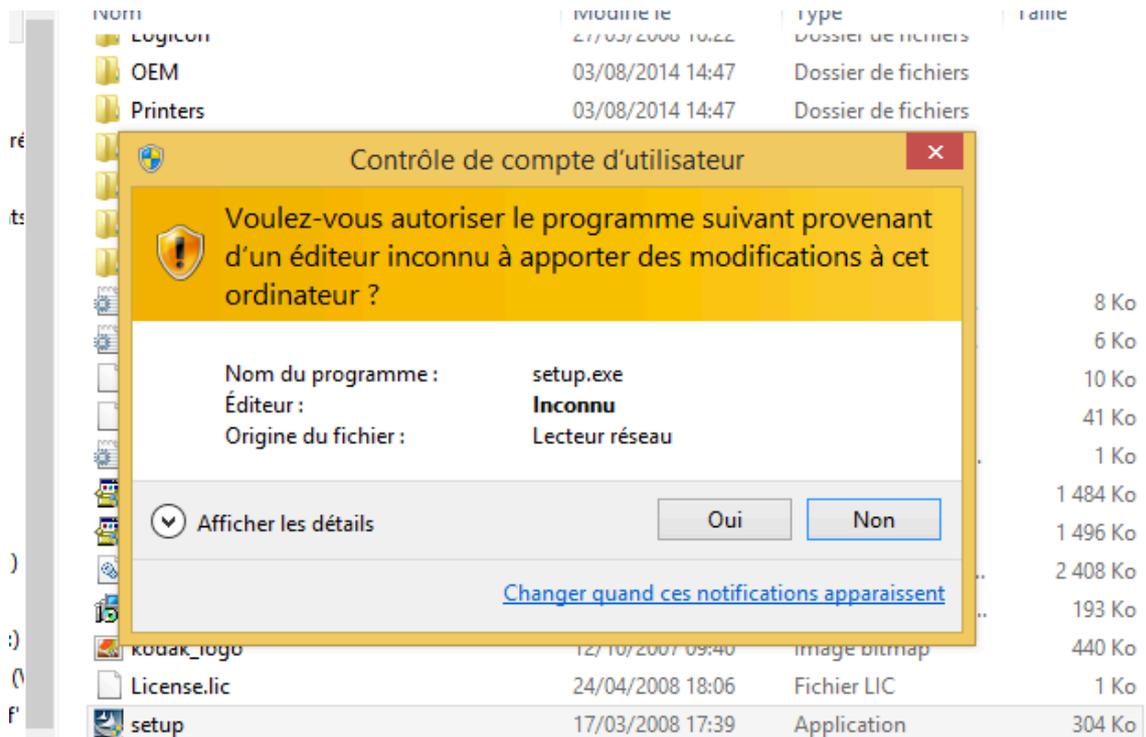


l'installation commence

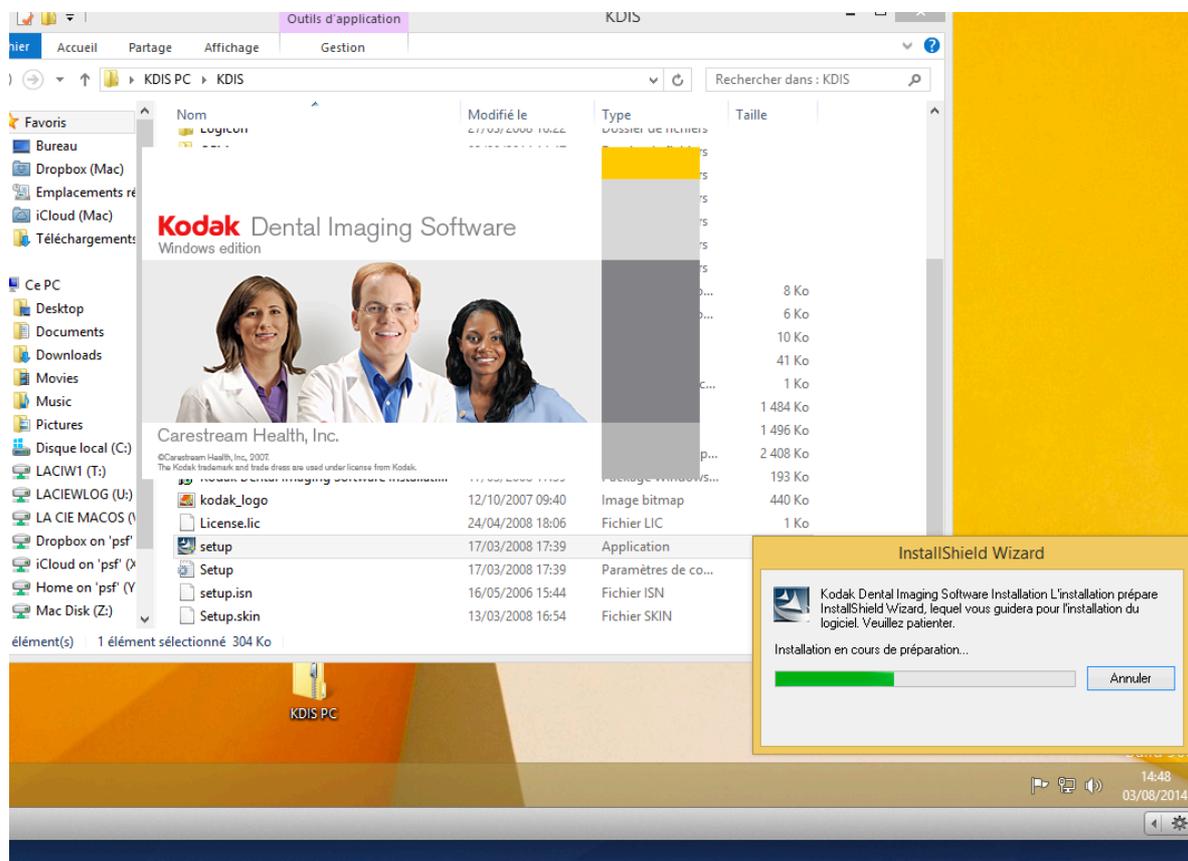


et écran de bienvenue


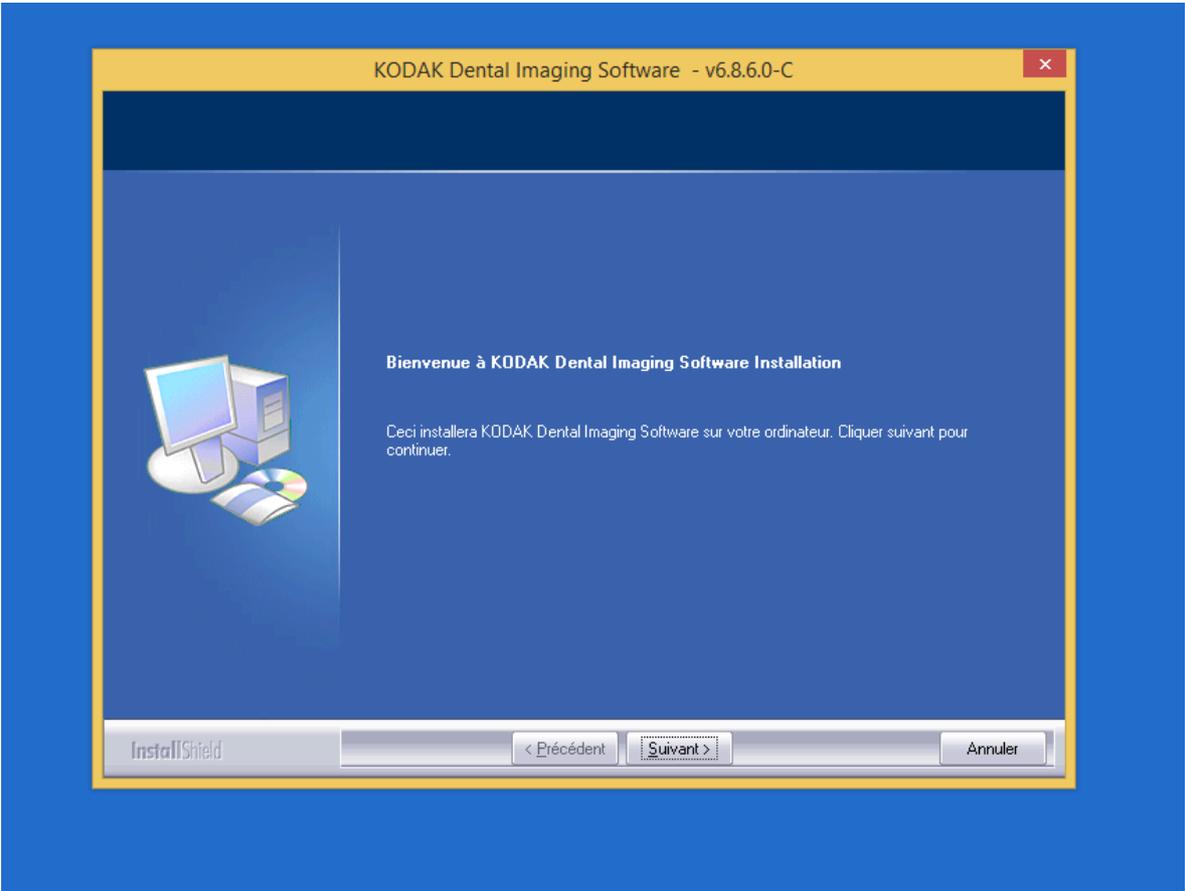


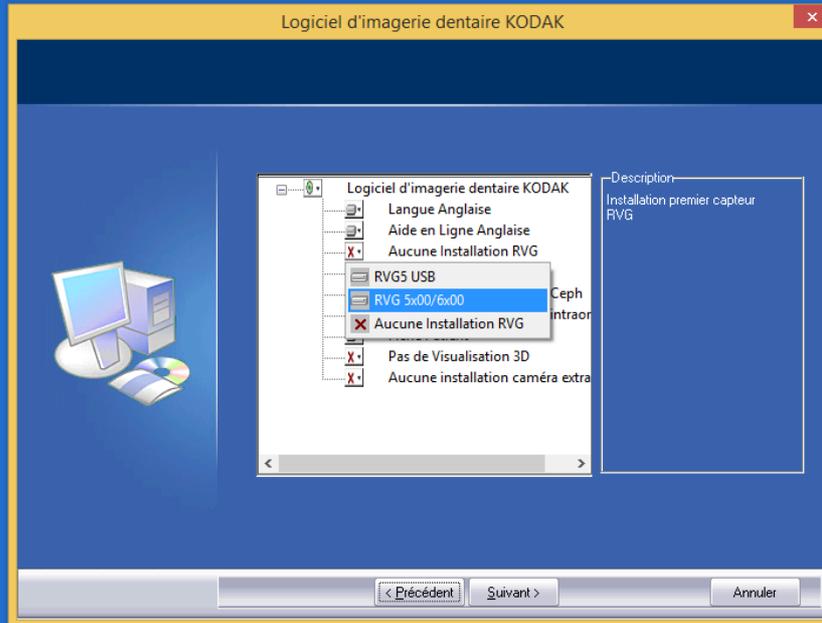


choisir les options à installer : le logiciel, les drivers ici RVG de la série 6000

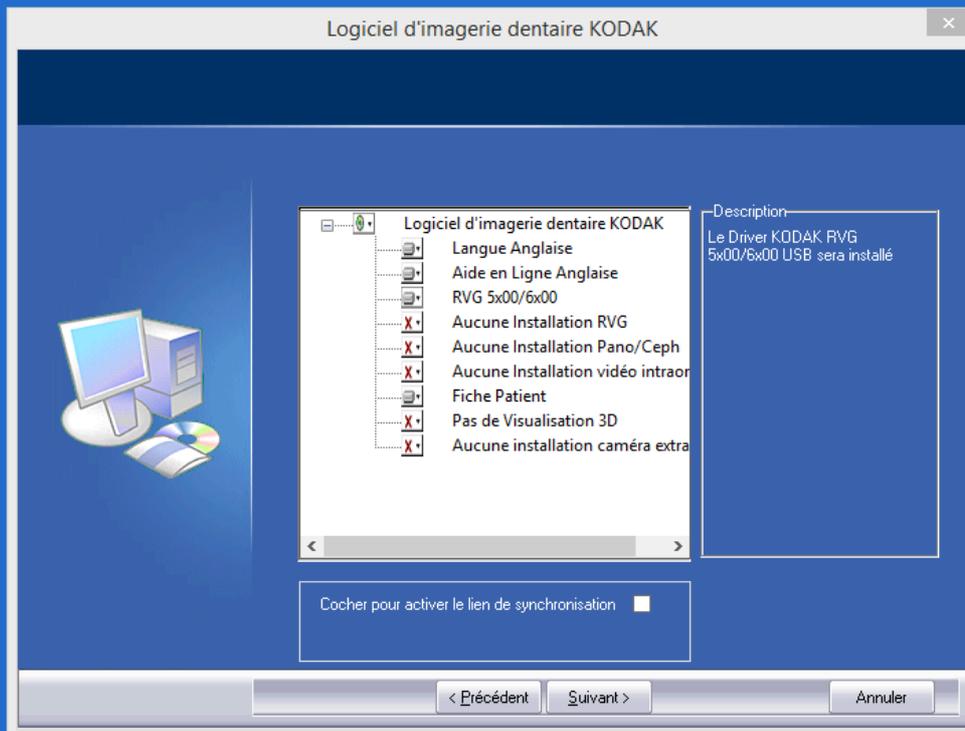


l'installation des options commence

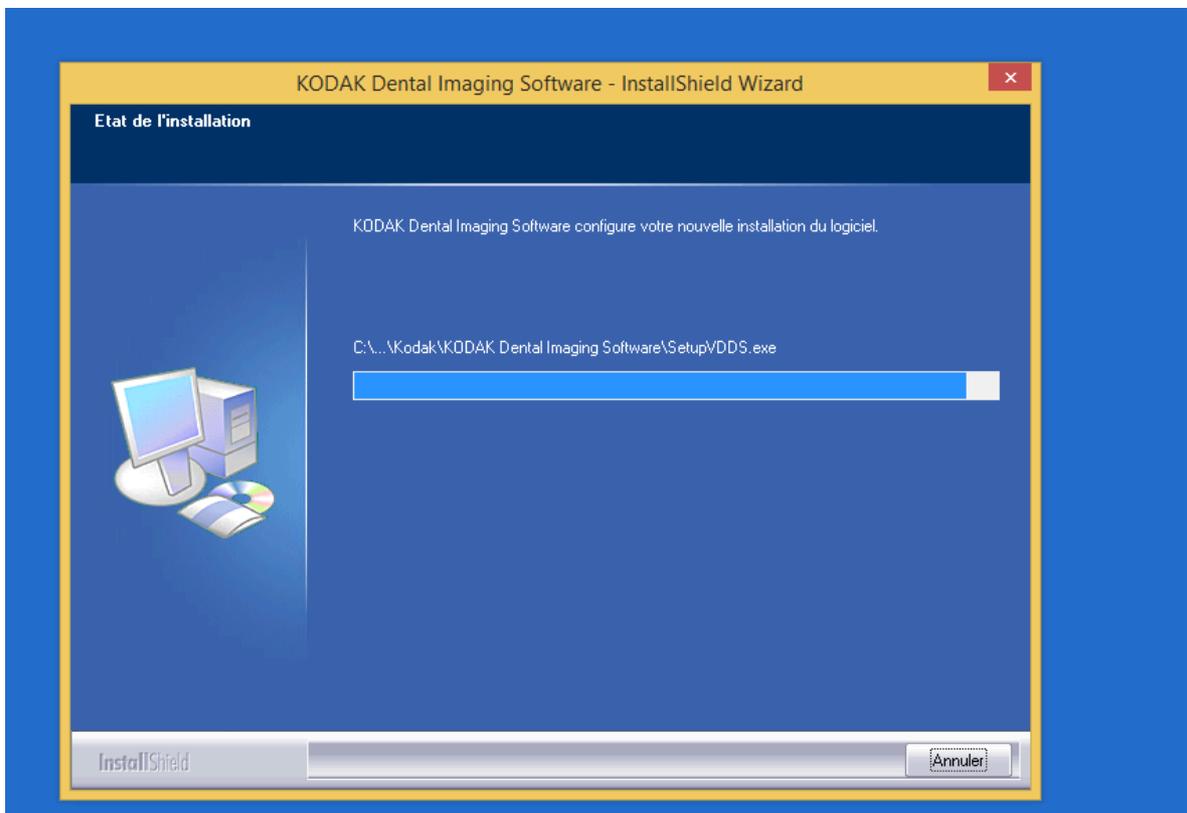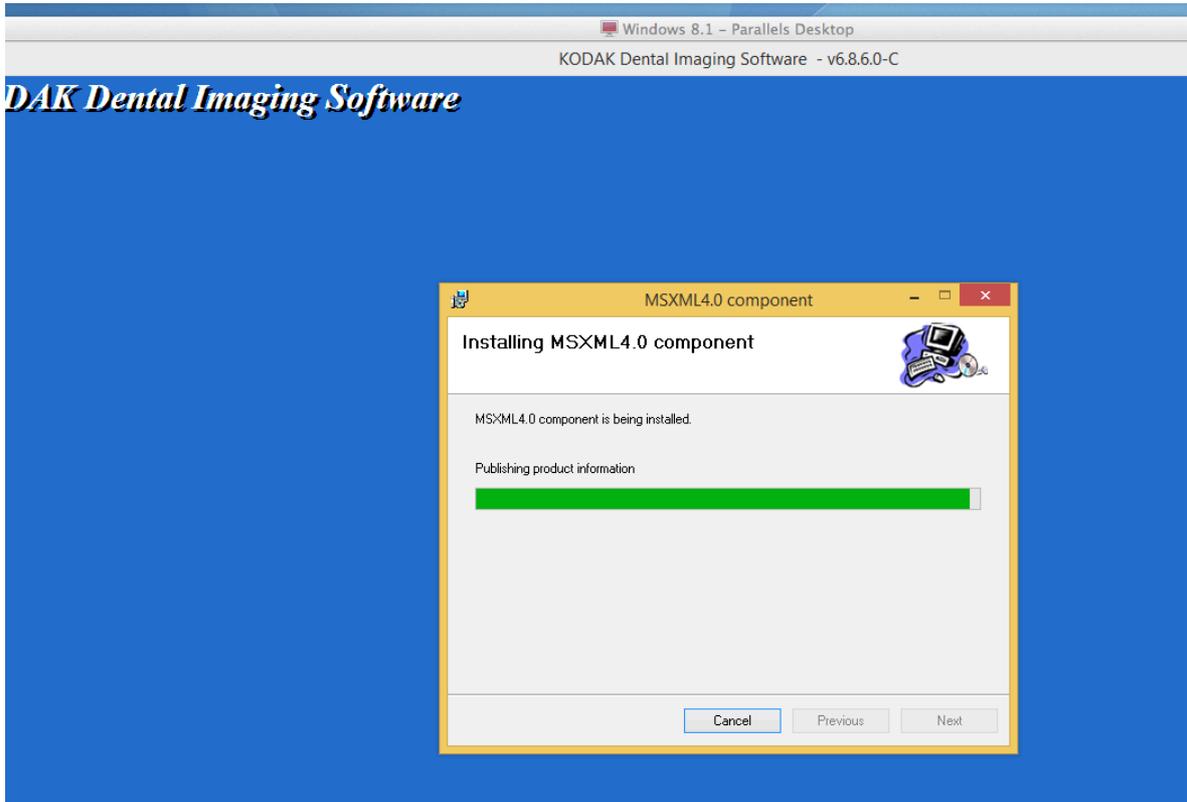


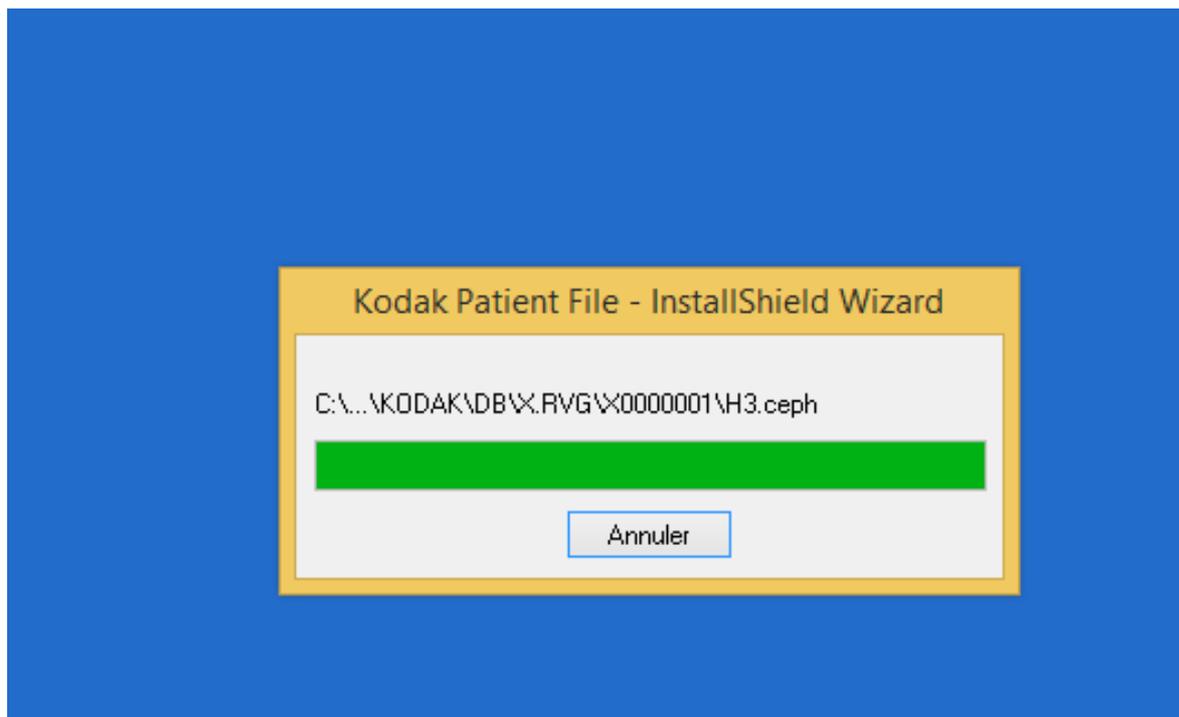


installation terminée


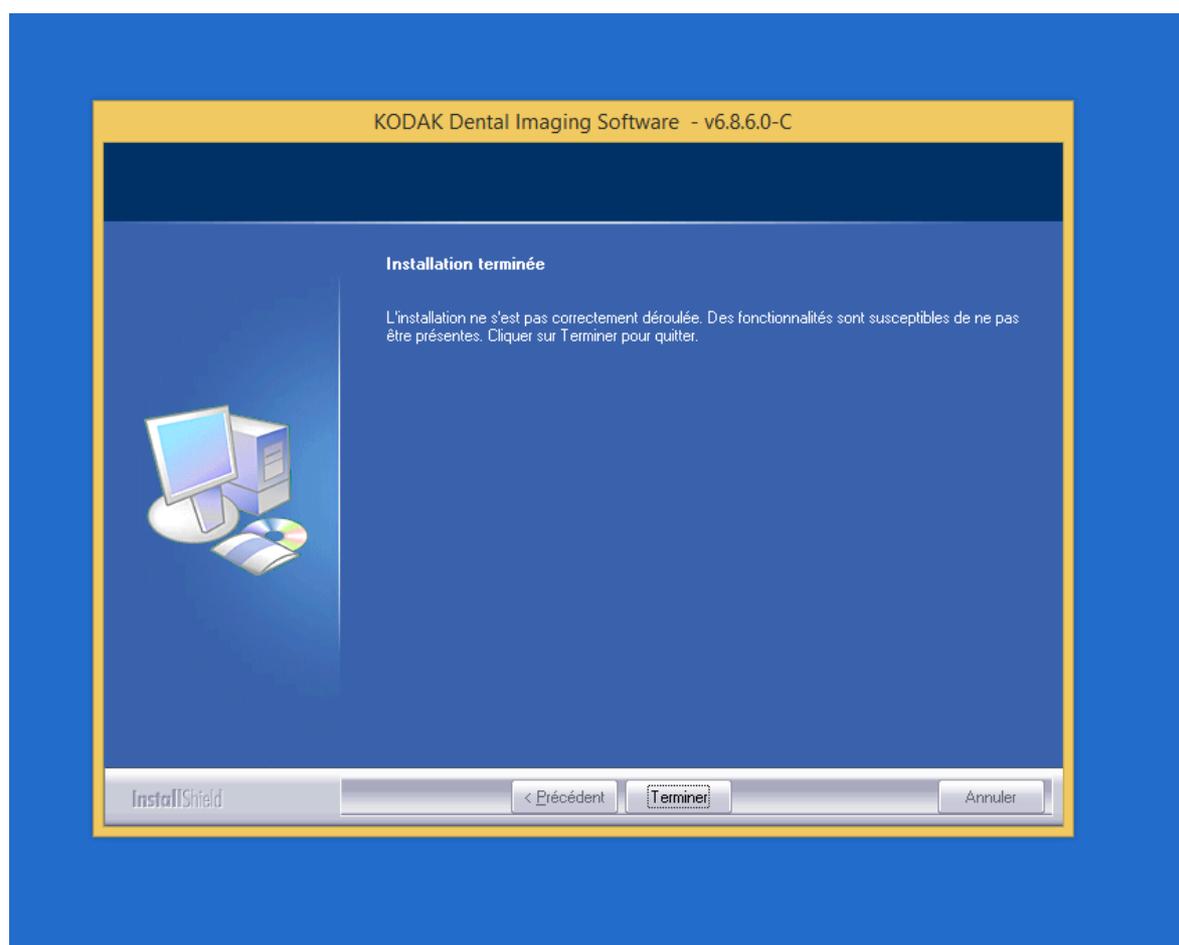


on retrouve le programme dans les applications

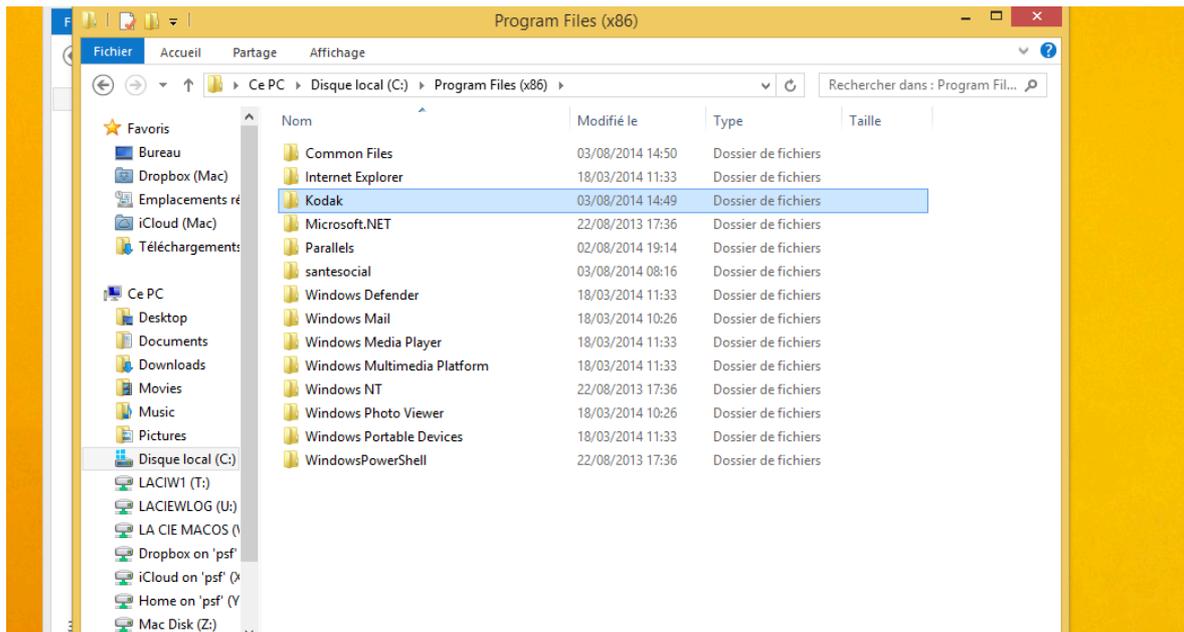


pour enregistrer la licence lancer dans un premier temps Patient (mieux avec clic droit en tant qu'administrateur)

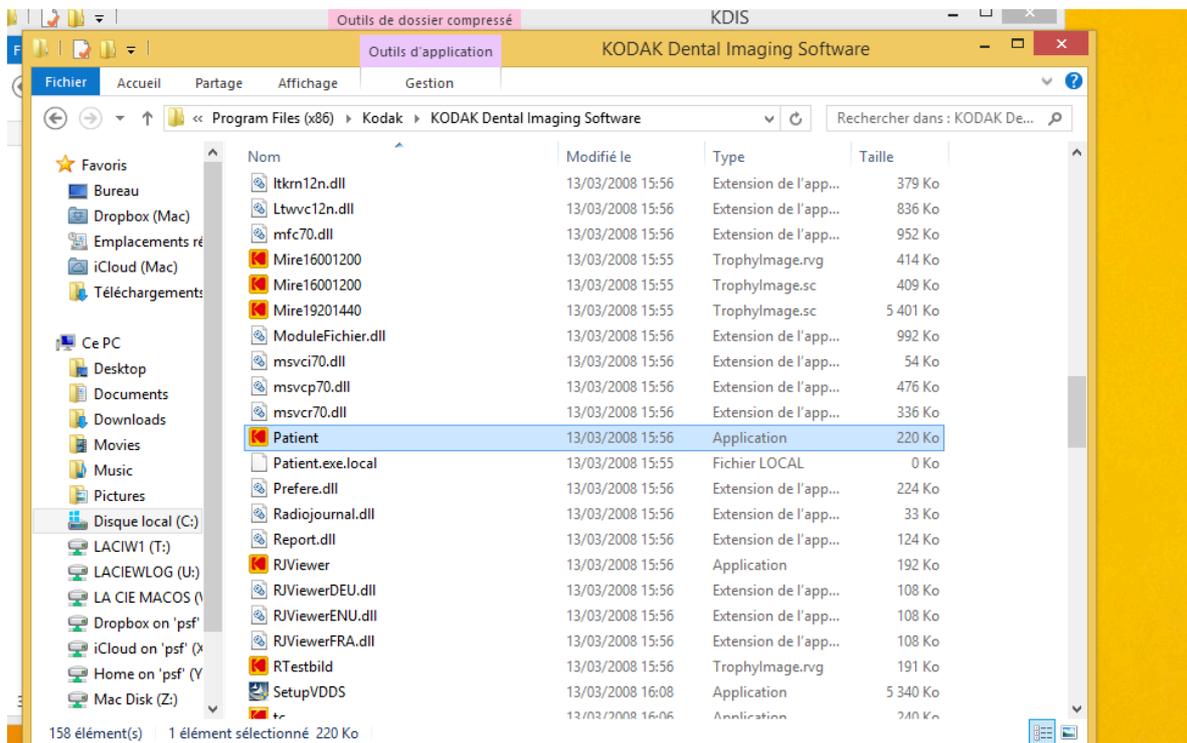


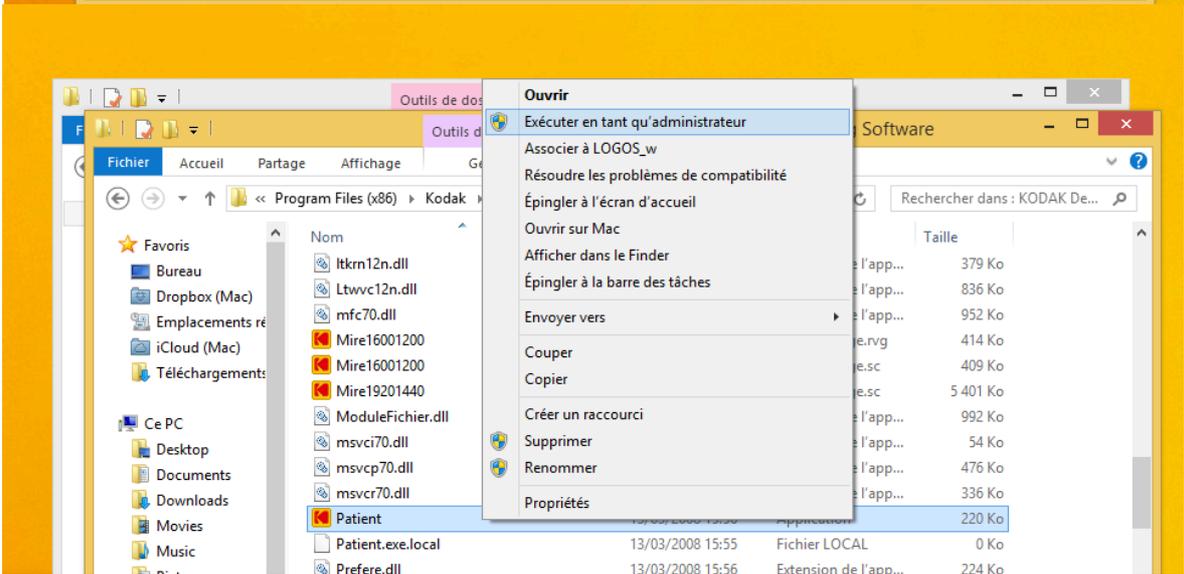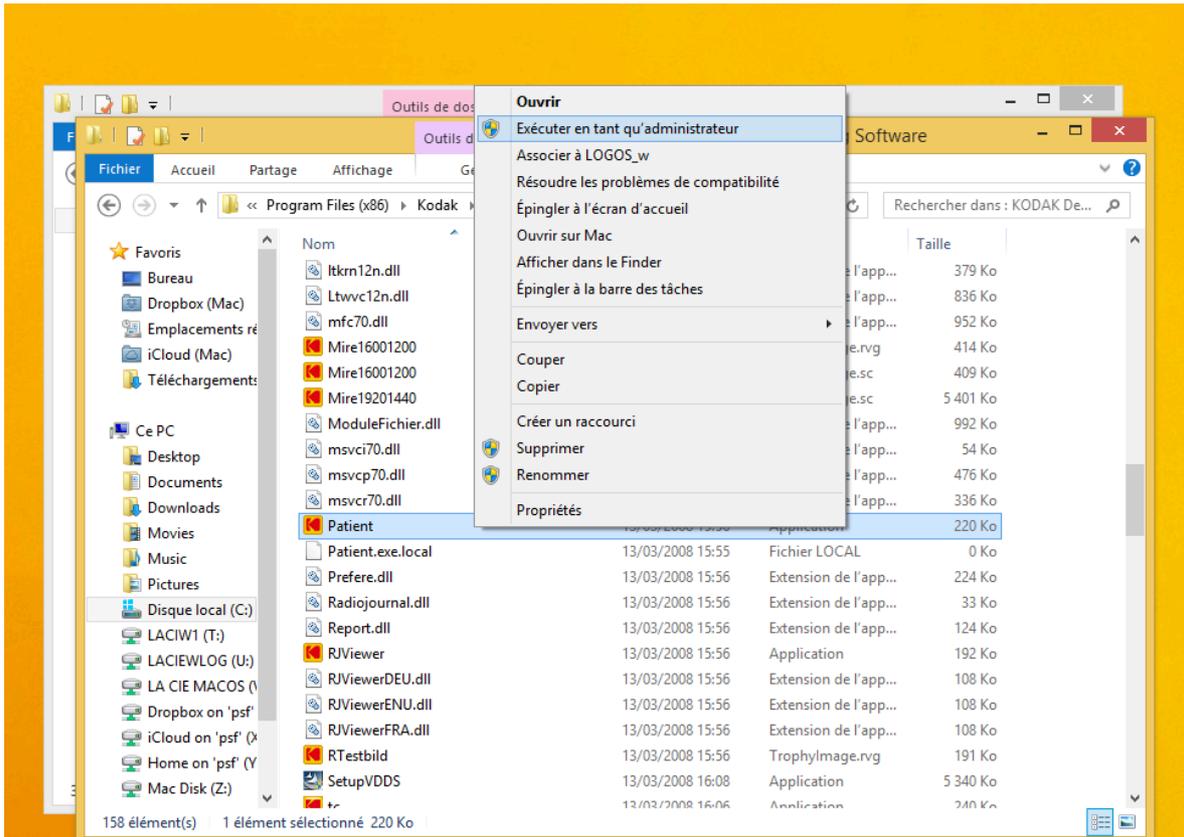


Autoriser

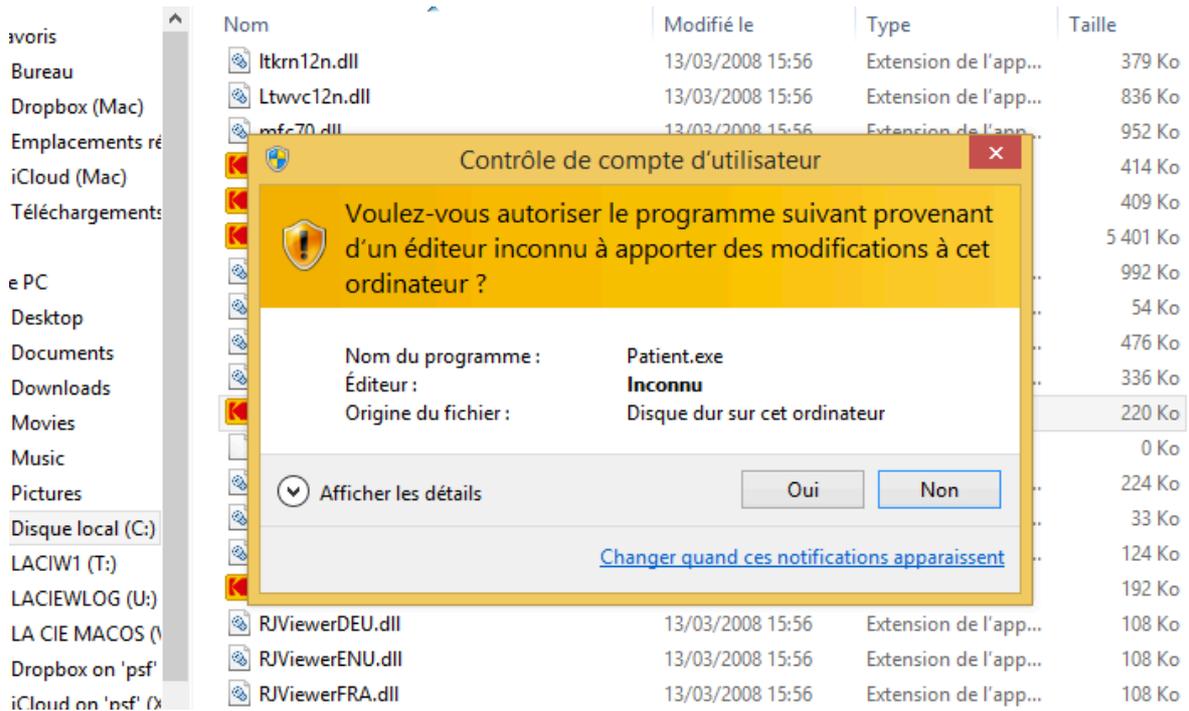


créer un patient fictif (new) ou en ouvrir un

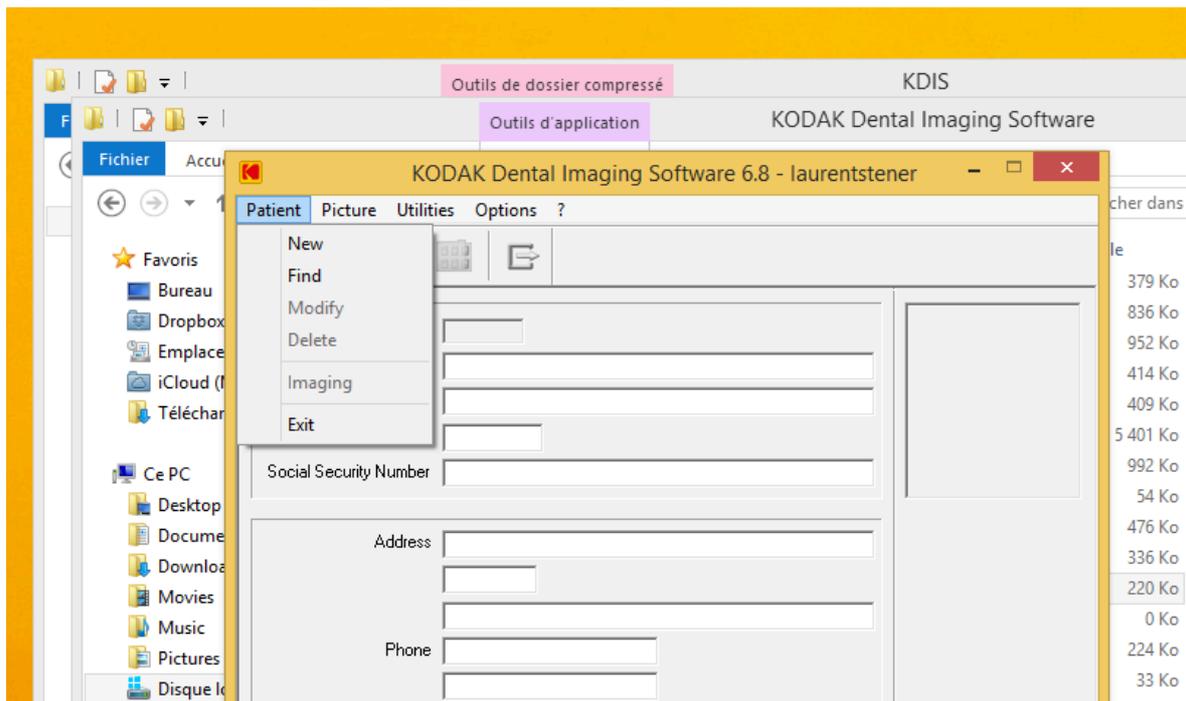


un clic sur le bouton imagerie

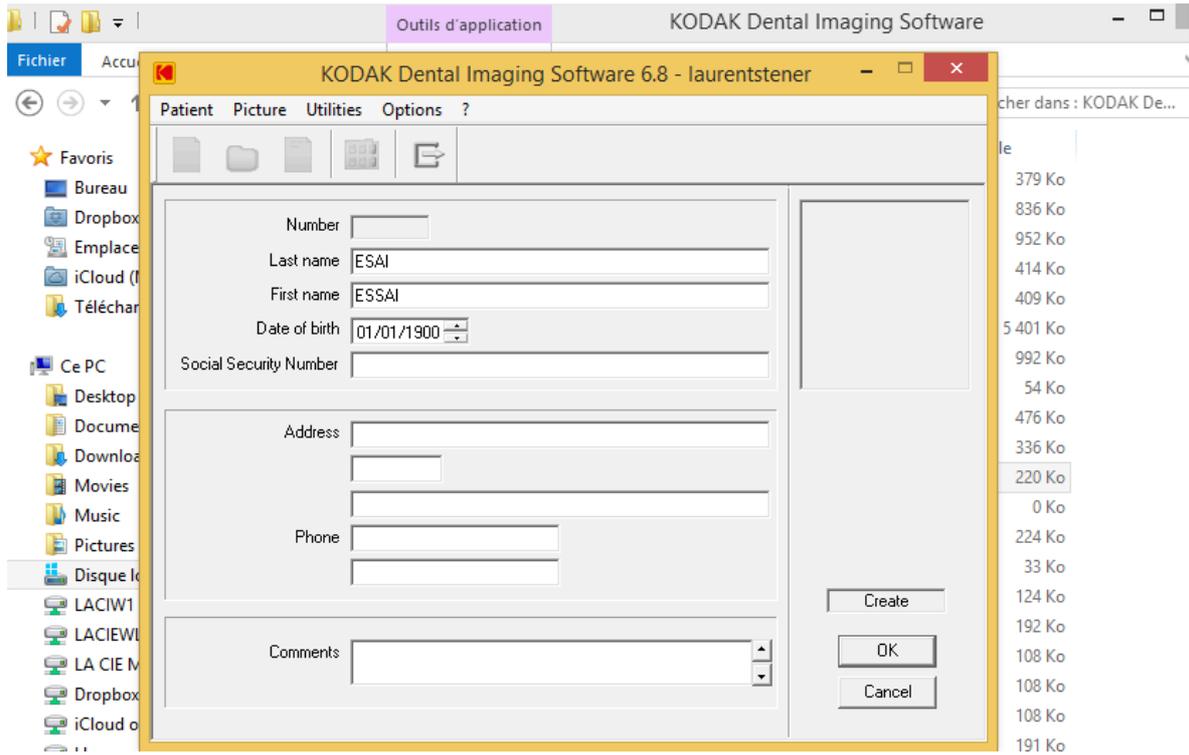


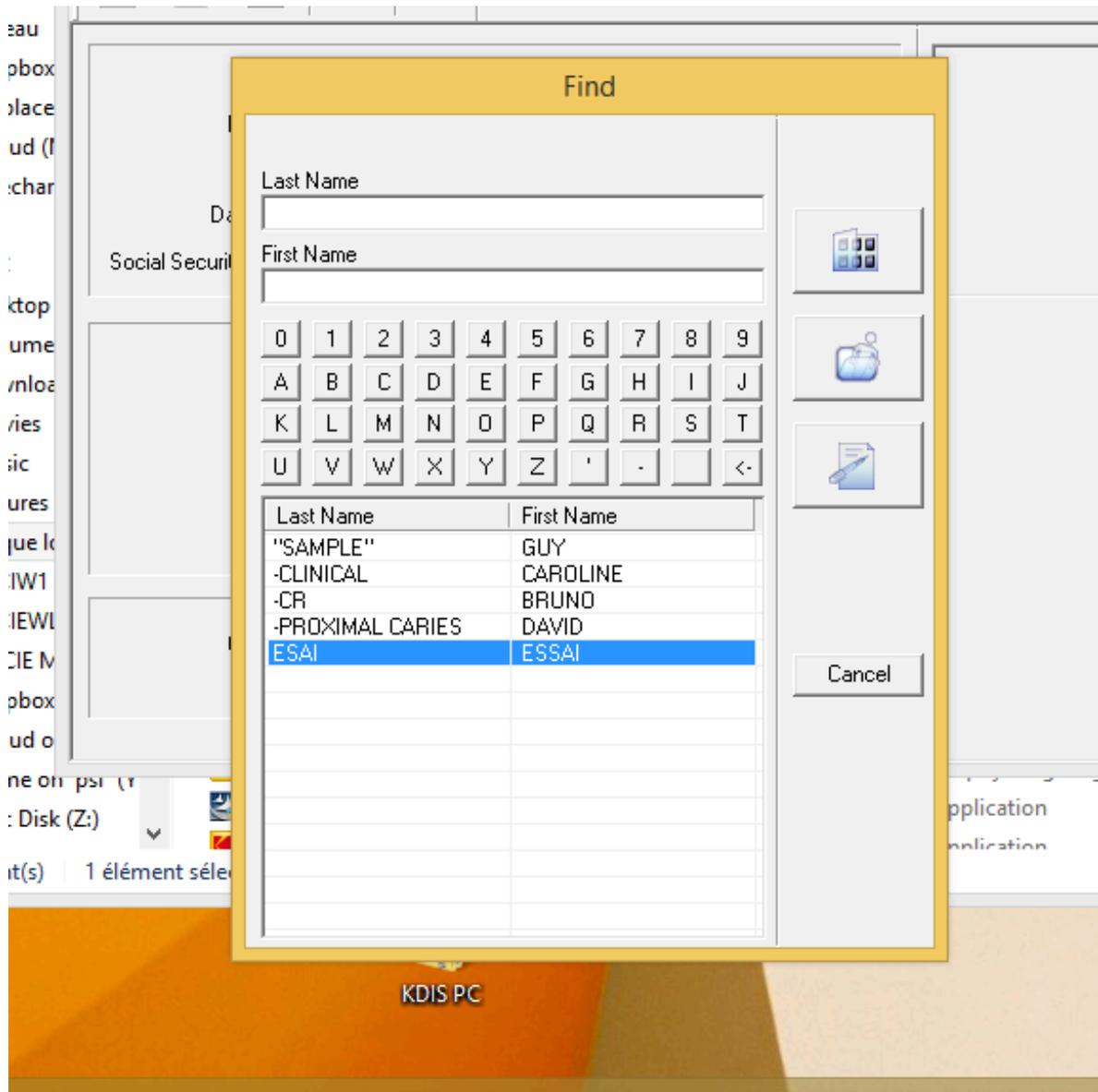

et dans la barre de menu , le menu ? et sous menu licence
aller sur le site Carestream <http://register.carestreamdental.com/eamer/default.aspx>
ouvrir ou créer votre compte
adresse électronique mot de passes et N) de série du capteur (situé sur la prise USB du capteur)
entrer le chiffre affiché en haut à gauche Licence Key pour votre capteur enregistré et vous obtiendrez Licence Number
valider (validate)

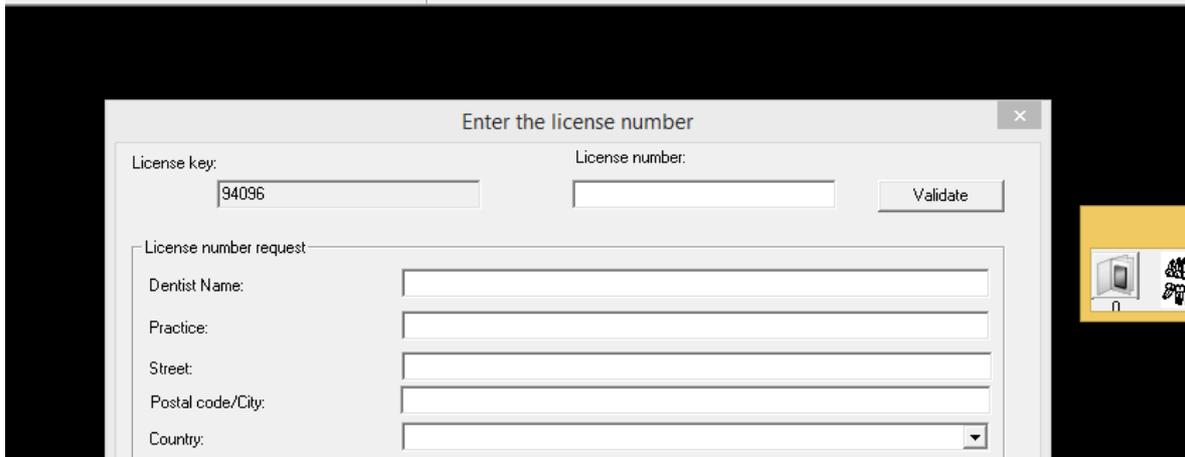

quitter l'application Kodak
 lancer Logos
 aller dans Outils Configuration du poste
 Radiographie numérique
 choisir Kodak dental Imaging

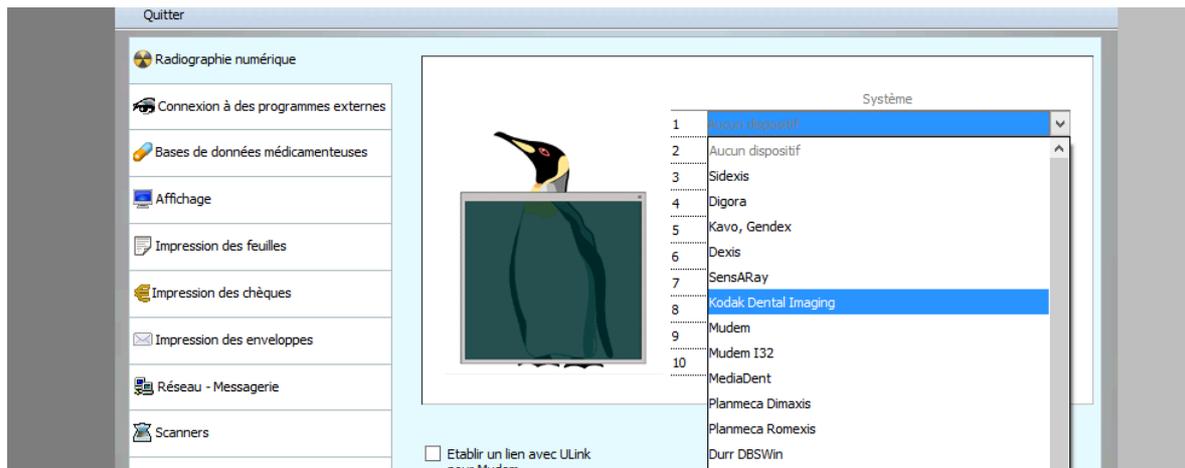

Choisir Executable le dossier Dental Imaging (dans applications)
 et le répertoire où devront se situer les radios

Systeme



1	Kodak Dental Imaging	▼
2	Aucun dispositif	▼
3	Aucun dispositif	▼
4	Aucun dispositif	▼
5	Aucun dispositif	▼
6	Aucun dispositif	▼
7	Aucun dispositif	▼
8	Aucun dispositif	▼
9	Aucun dispositif	▼
10	Aucun dispositif	▼

Systeme radio n°1 : kodak dental imaging

c ULink

Exécutable : 

Données : 

Utiliser la base DBF