

# Exemple d'étiquettes codes barres

SACHET  
ELEVATEUR DROIT LARGE



000 000 004 002


Date de stérilisation : 19/05/2009

Date de péremption : 17/08/2009

NC


UNIDENT AQUARIUS 40B

# Paramétrage des étiquettes

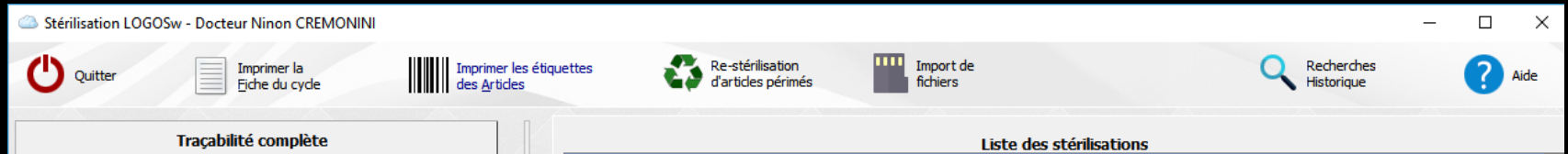


⇒ Clic sur l'icône

⇒ Ouverture de la fenêtre

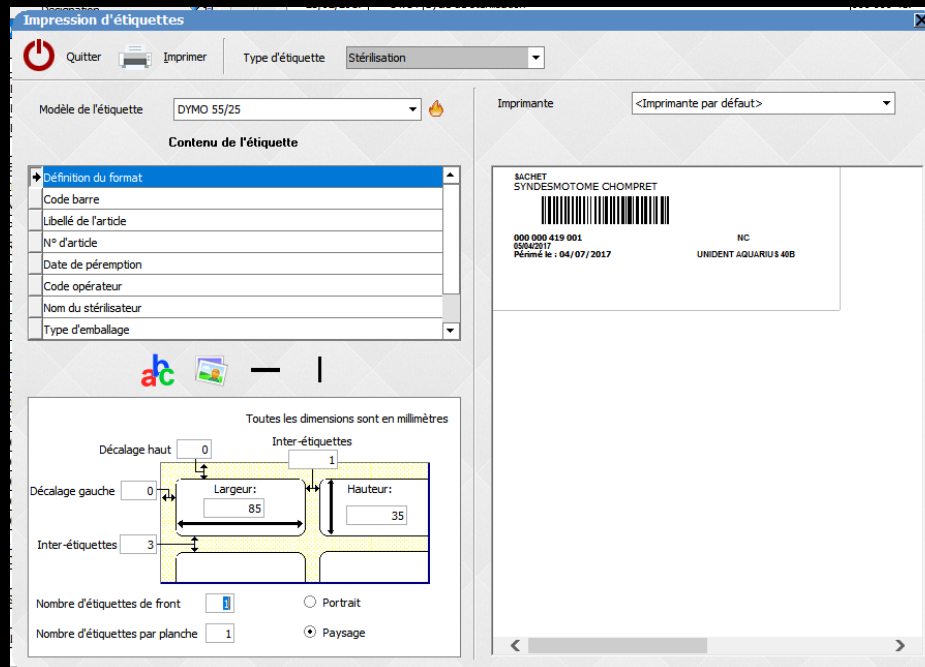


# Choix de l'imprimante

- ⇒ Soit l'imprimante habituelle du cabinet avec des planches d'étiquettes autocollantes
- ⇒ Soit une imprimante à étiquettes style Dymo avec des rouleaux d'étiquettes

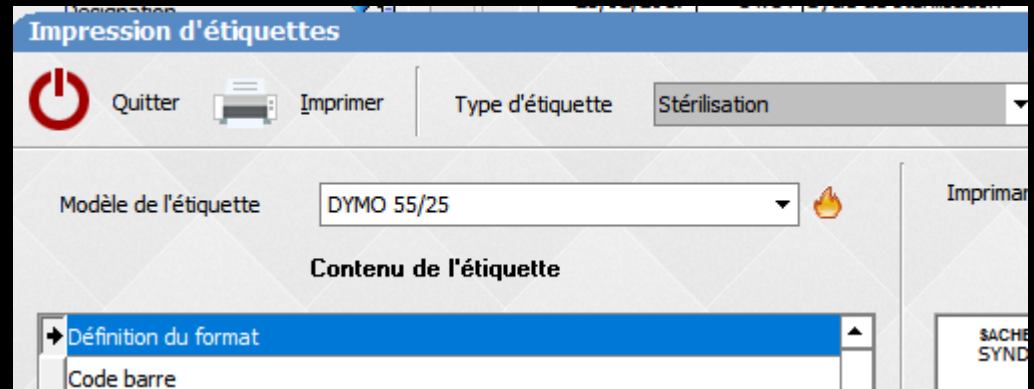

# Modèle d'étiquettes

⇒ Le format 55/25 de la dymo LabelWriter 400 étant le format par défaut

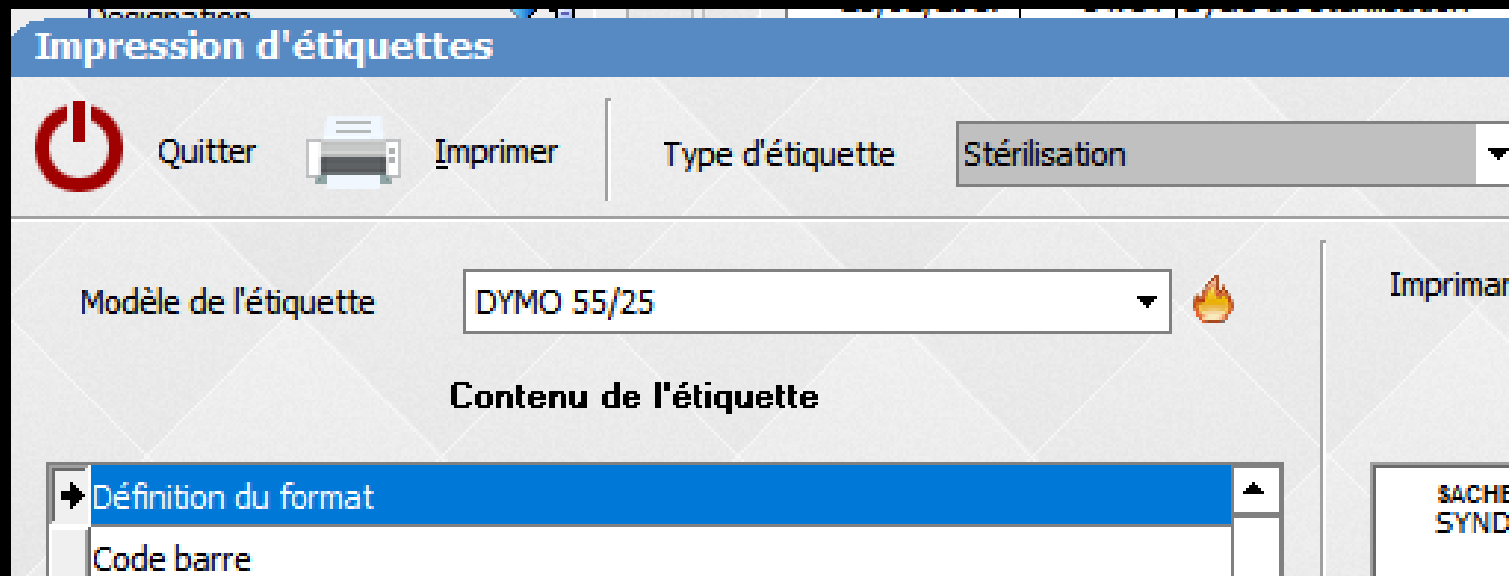

# Portrait ou paysage

⇒ Pour une imprimante à étiquettes style Dymo ⇒ **Paysage**

⇒ Les étiquettes sont en rouleau et sortent de gauche à droite

⇒ Pour des planches d'étiquettes pour une imprimante jet d'encre ou laser ⇒ **Portrait**

⇒ Les feuilles d'étiquettes A4 sortent de haut en bas

Contenu de l'étiquette

|                      |
|----------------------|
| Définition du format |
| Code barre           |
| Libellé de l'article |
| N° d'article         |
| Date de péremption   |
| Code opérateur       |
| Nom du stérilisateur |
| Type d'emballage     |

abc [Image] |

Toutes les dimensions sont en millimètres

Décalage haut: 0

Décalage gauche: 0

Inter-étiquettes: 1

Inter-étiquettes: 3

Largeur: 85

Hauteur: 35

Nombre d'étiquettes de front: 1

Nombre d'étiquettes par planche: 1

Portrait

Paysage

# Détails du format

## ⇒ Paramétrage du format d'étiquettes choisi en millimètres

⇒ Décalage haut, et inter-étiquettes entre deux étiquettes de front

⇒ Décalage gauche du positionnement de l'étiquette

⇒ Inter-étiquettes entre deux étiquettes qui se suivent

⇒ Nombre d'étiquettes de front sur la même ligne

⇒ Nombre d'étiquettes par planche sur une feuille d'étiquettes

⇒ Pour les étiquettes en rouleau (1 étiquette à la fois) donc juste inter-étiquettes entre chaque étiquette

Contenu de l'étiquette

|                        |
|------------------------|
| ↳ Définition du format |
| Code barre             |
| Libellé de l'article   |
| N° d'article           |
| Date de péremption     |
| Code opérateur         |
| Nom du stérilisateur   |
| Type d'emballage       |

Toutes les dimensions sont en millimètres

Nombre d'étiquettes de front  Portrait  Paysage

Nombre d'étiquettes par planche  1  Paysage

Toutes les dimensions sont en millimètres

Nombre d'étiquettes de front  Portrait  Paysage

Nombre d'étiquettes par planche  1  Paysage

# Code barre

⇒ **Cochez la case Imprimer**

⇒ Le code-barre sera imprimé sur l'étiquette

⇒ En fonction du format d'étiquettes on ajuste les valeurs du positionnement et des dimensions du code barre sur l'étiquette

⇒ Soit les valeurs par défaut

⇒ Soit des valeurs compatibles avec le format choisi

Modèle de l'étiquette: DYMO 55/25

Contenu de l'étiquette

- Définition du format
- Code barre
- Libellé de l'article
- N° d'article
- Date de péremption
- Code opérateur
- Nom du stérilisateur
- Type d'emballage

Imprimer

Toutes les dimensions sont en millimètres

Marge gauche (X)  Largeur

Marge haute (Y)  Hauteur




# Libellé de l'article

⇒ **Cochez la case Imprimer**



⇒ Le libellé de l'article sera imprimé sur l'étiquette

⇒ **Libellé optionnel** : si on a donné un nom à chaque article, ne pas remplir car il apparaîtra sur l'étiquette si on a coché "Imprimer" sauf si on veut rajouter un détail supplémentaire

Modèle de l'étiquette D'YMO 55/25 

Contenu de l'étiquette

|                             |
|-----------------------------|
| Définition du format        |
| Code barre                  |
| <b>Libellé de l'article</b> |
| N° d'article                |
| Date de péremption          |
| Code opérateur              |
| Nom du stérilisateur        |
| Type d'emballage            |

  - |

Imprimer Toutes les dimensions sont en millimètres

Libellé optionnel

Marge gauche (X)  Marge haute (Y)


Largeur  Centrage

Police

Taille  Couleur

Gras  Italique  Souligné

**ELEVATEUR DROIT LARGE**



000 000 004 002  
Date de stérilisation : 19/05/2009  
Date de péremption : 17/08/2009

NC  
UNIDENT AQUARIUS 40B



# Numéro de l'article

- ⇒ **Cochez la case Imprimer**
  - ⇒ Le numéro de l'article sera imprimé sur l'étiquette
- ⇒ **Celui-ci sera mis automatiquement en fonction des articles mis dans un cycle de stérilisation**
- ⇒ **Juste à régler**
  - ⇒ La position de cette impression sur l'étiquette
  - ⇒ La police
  - ⇒ La taille
  - ⇒ Le format gras ou italique

Modèle de l'étiquette: DYMO 55/25

Contenu de l'étiquette

|                      |
|----------------------|
| Définition du format |
| Code barre           |
| Libellé de l'article |
| N° d'article         |
| Date de péremption   |
| Code opérateur       |
| Nom du stérilisateur |
| Type d'emballage     |

Imprimer

Toutes les dimensions sont en millimètres

Libellé optionnel:

Marge gauche (X):  Marge haute (Y):

Largeur:  Centrage:

Police:

Taille:  Couleur:

Gras  Italique  Souligné



# Date de péremption

- ⇒ La date s'affichera si on coche la case "imprimer"
- ⇒ Si on veut que le libellé "Date de péremption" apparaissent en toutes lettres, on l'écrit dans la case "Libellé optionnel"
- ⇒ On règle ensuite
  - ⇒ La position de cette inscription sur l'étiquette
  - ⇒ La police
  - ⇒ La taille
  - ⇒ Le caractère gras ou italique

Modèle de l'étiquette: DYMO 55/25

Contenu de l'étiquette

|                           |
|---------------------------|
| Définition du format      |
| Code barre                |
| Libellé de l'article      |
| N° d'article              |
| <b>Date de péremption</b> |
| Code opérateur            |
| Nom du stérilisateur      |
| Type d'emballage          |

Imprimer Toutes les dimensions sont en millimètres

Libellé optionnel: Périmé le : \_\_\_\_\_

Marge gauche (X): 5 Marge haute (Y): 20

Largeur: 0 Centrage: A gauche

Police: Tahoma

Taille: 6 Couleur: Noir

Gras  Italique  Souligné



# Code opérateur

- ⇒ En cochant la case "Imprimer" les initiales du praticien s'afficheront automatiquement
- ⇒ Dans la case "Libellé optionnel" on pourra mettre le nom ou les initiales de la personne qui réalise le cycle de stérilisation
- ⇒ On règle ensuite
  - ⇒ La position de cette inscription sur l'étiquette
  - ⇒ La police
  - ⇒ La taille
  - ⇒ Le caractère gras ou italique

Modèle de l'étiquette DYMO 55/25

Contenu de l'étiquette

|                      |
|----------------------|
| Définition du format |
| Code barre           |
| Libellé de l'article |
| N° d'article         |
| Date de péremption   |
| Code opérateur       |
| Nom du stérilisateur |
| Type d'emballage     |

Imprimer Toutes les dimensions sont en millimètres

Libellé optionnel

Marge gauche (X)  Marge haute (Y)

Largeur  Centrage

Police

Taille  Couleur

Gras  Italique  Souligné

SACHET  
ELEVATEUR DROIT LARGE



000 000 004 002  
Date de stérilisation : 19/05/2009  
Date de péremption : 17/08/2009

**NC**  
UNIDENT AQUARIUS 40B

# Nom du stérilisateur

- ⇒ Si on veut que celui-ci apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer"
- ⇒ Dans la case "Libellé optionnel" on pourra mettre un détail supplémentaire
- ⇒ On règle ensuite
  - ⇒ La position de cette inscription sur l'étiquette
  - ⇒ La police
  - ⇒ La taille
  - ⇒ Le caractère gras ou italique

Modèle de l'étiquette: DYMO 55/25

Contenu de l'étiquette

|                             |
|-----------------------------|
| Définition du format        |
| Code barre                  |
| Libellé de l'article        |
| N° d'article                |
| Date de péremption          |
| Code opérateur              |
| <b>Nom du stérilisateur</b> |
| Type d'emballage            |

Imprimer Toutes les dimensions sont en millimètres

Libellé optionnel:

Marge gauche (X):  Marge haute (Y):

Largeur:  Centrage:

Police:

Taille:  Couleur:

Gras  Italique  Souligné

SACHET  
ELEVATEUR DROIT LARGE



000 000 004 002  
Date de stérilisation : 19/05/2009  
Date de péremption : 17/08/2009

NC

UNIDET AQUARIUS 40B

# Type d'emballage

- ⇒ Si on veut que celui-ci apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer"
- ⇒ Dans la case "Libellé optionnel" on pourra mettre un détail supplémentaire
- ⇒ On règle ensuite
  - ⇒ La position de cette inscription sur l'étiquette
  - ⇒ La police
  - ⇒ La taille
  - ⇒ Le caractère gras ou italique

Modèle de l'étiquette: DYMO 55/25

Contenu de l'étiquette

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Définition du format |
|  | Code barre           |
|  | Libellé de l'article |
|  | N° d'article         |
|  | Date de péremption   |
|  | Code opérateur       |
|  | Nom du stérilisateur |
|  | Type d'emballage     |

Imprimer Toutes les dimensions sont en millimètres

Libellé optionnel:

Marge gauche (X):  Marge haute (Y):

Largeur:  Centrage:

Police:

Taille:  Couleur:

Gras  Italique  Souligné



# Date de stérilisation

- ⇒ Si on veut que celle-ci apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer"
- ⇒ Si on veut que le libellé "Date de stérilisation" apparaissent en toutes lettres, on l'écrit dans la case "Libellé optionnel"
- ⇒ On règle ensuite
  - ⇒ La position de cette inscription sur l'étiquette
  - ⇒ La police
  - ⇒ La taille
  - ⇒ Le caractère gras ou italique

Modèle de l'étiquette: DYMO 55/25

Contenu de l'étiquette

|                              |
|------------------------------|
| Code barre                   |
| Libellé de l'article         |
| N° d'article                 |
| Date de péremption           |
| Code opérateur               |
| Nom du stérilisateur         |
| Type d'emballage             |
| <b>Date de stérilisation</b> |

Imprimer Toutes les dimensions sont en millimètres

Libellé optionnel:

Marge gauche (X):  Marge haute (Y):

Largeur:  Centrage:






Police:

Taille:  Couleur:

Gras  Italique  Souligné




# Possibilité de rajouter au contenu de l'étiquette

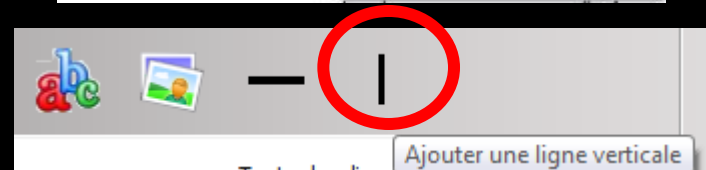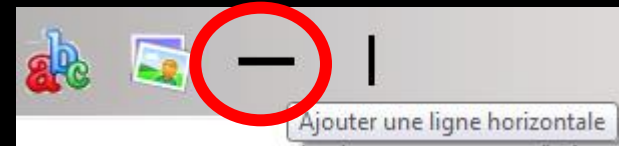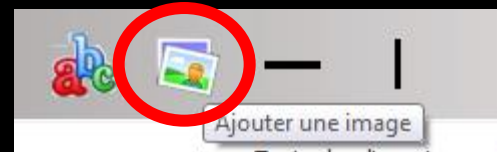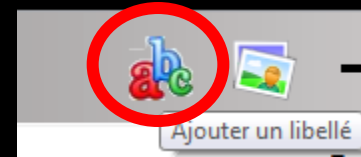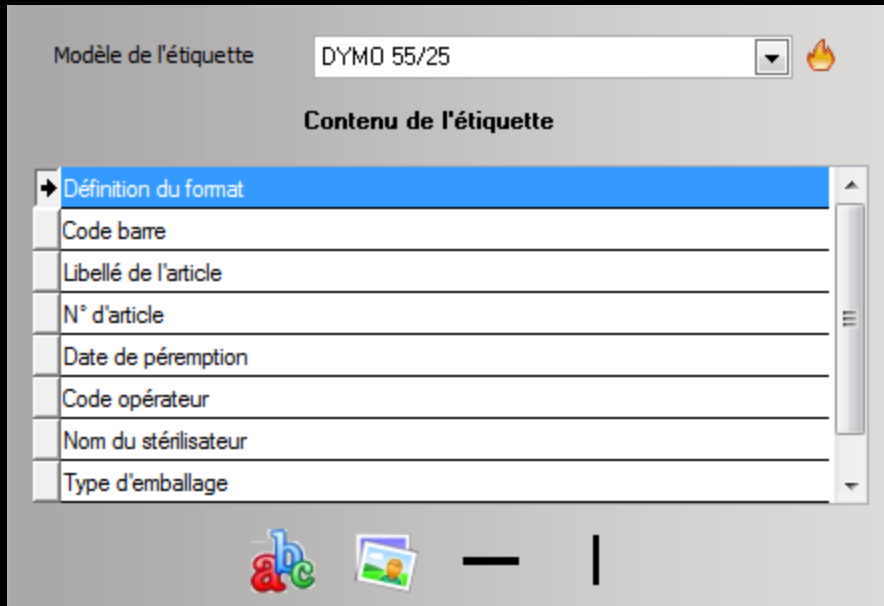


- ⇒ Un libellé
- ⇒ Une image
- ⇒ Une ligne horizontale
- ⇒ Une ligne verticale

# Ajouter un libellé


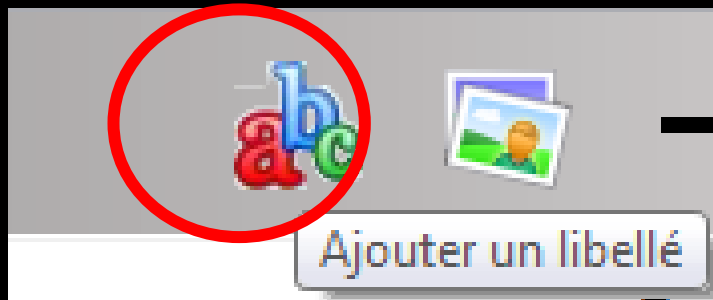


⇒ On paramètre la position de ce libellé

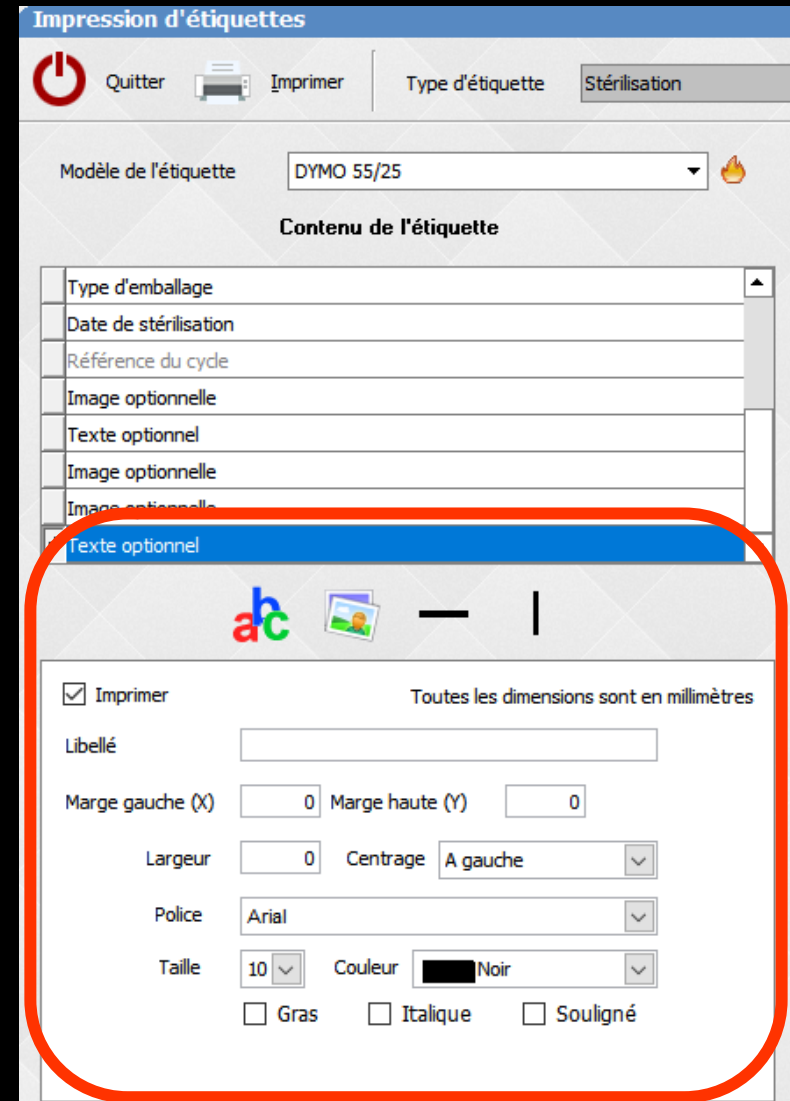




# Ajouter une image

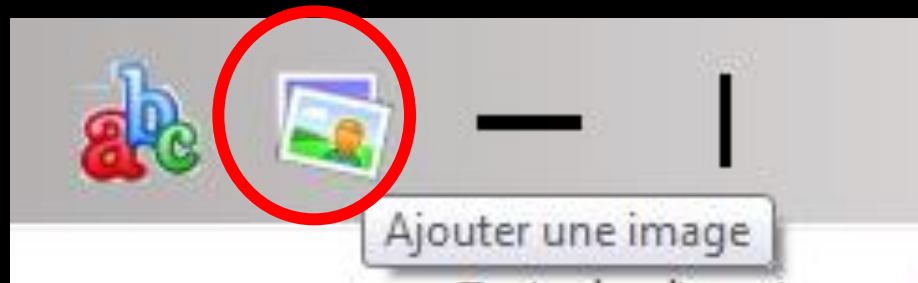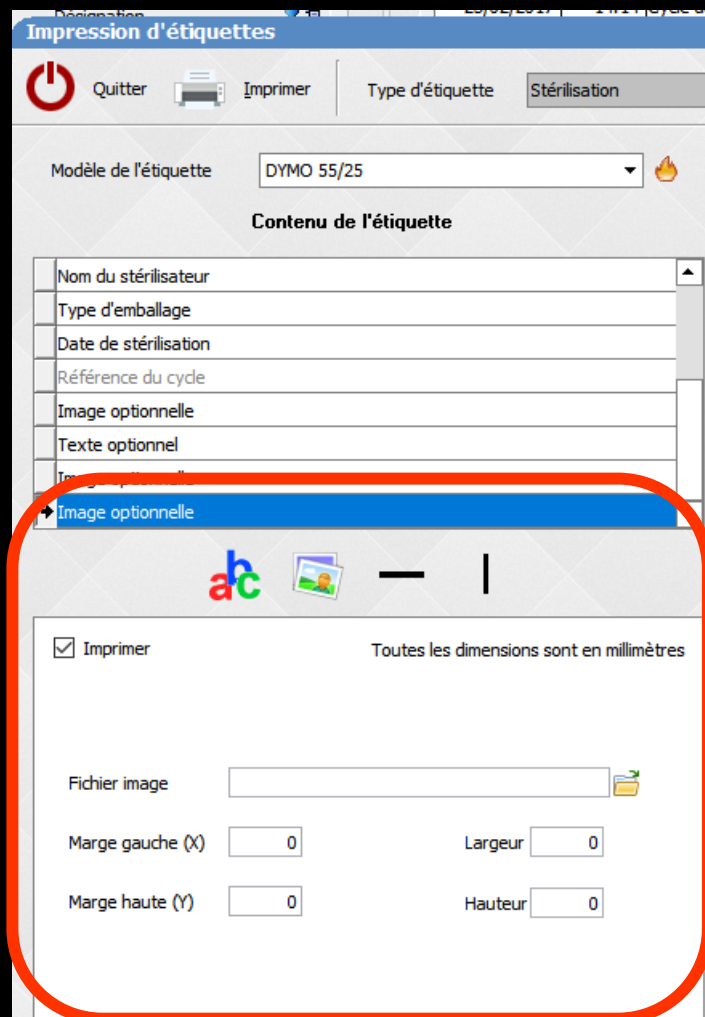


⇒ Par le petit classeur en bout de champ, choix de l'image à rajouter (image présente dans l'ordi)

⇒ Paramétrage de sa position


# Ajouter une ligne horizontale

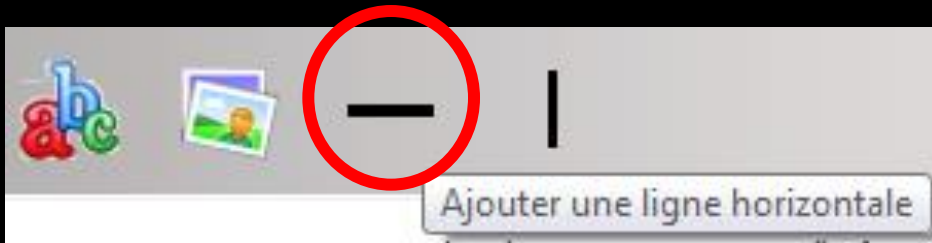


⇒ On paramètre  
la position de  
cette ligne

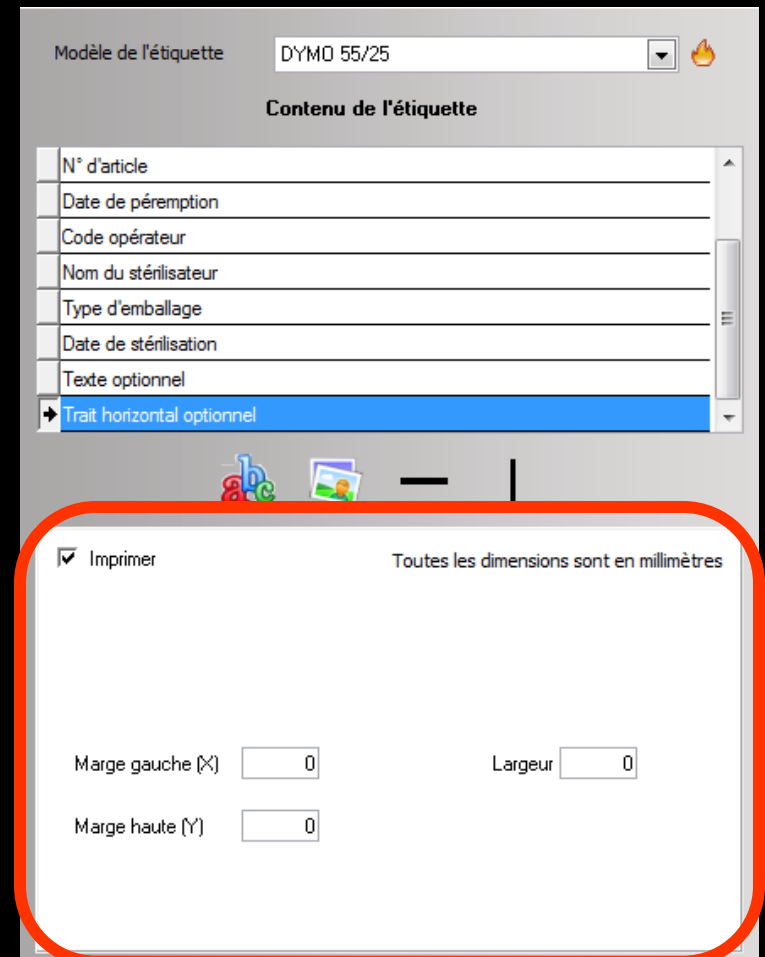

# Ajouter une ligne verticale

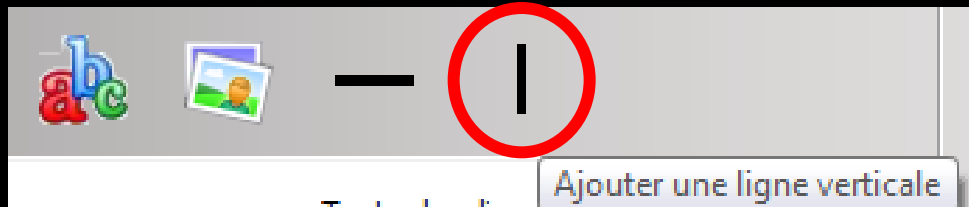

⇒ On paramètre la position de cette ligne

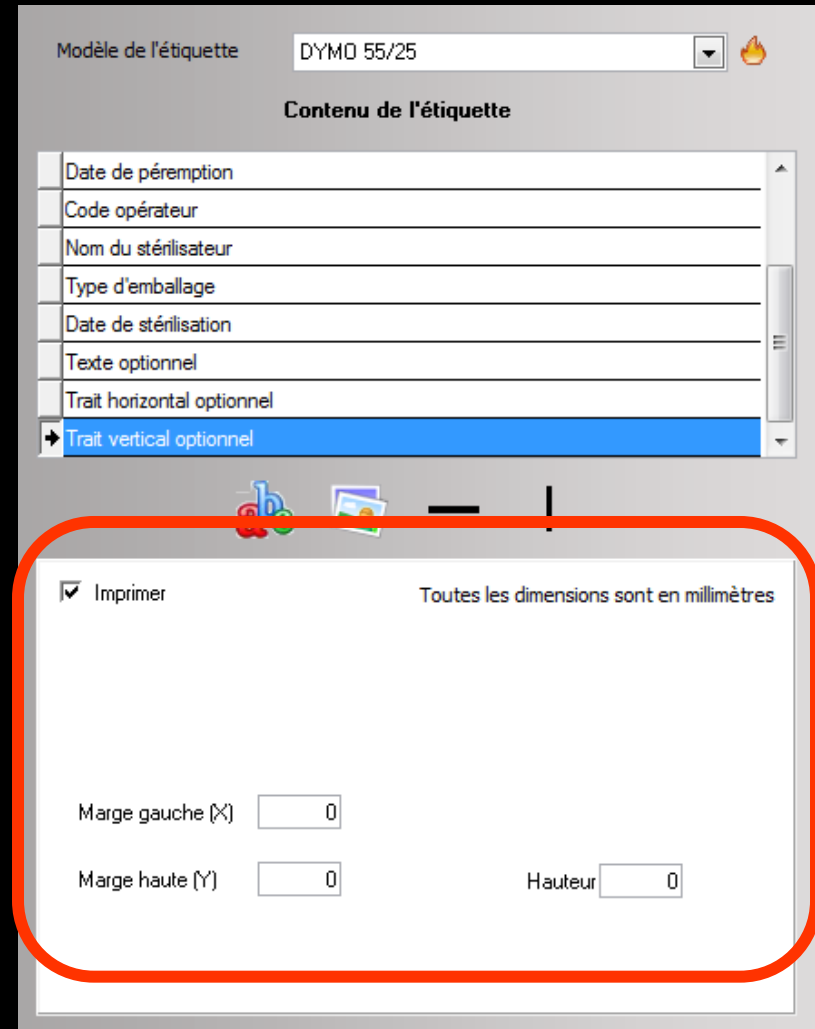

# Paramétrage des étiquettes

- ⇒ Le paramétrage se fait la première fois
- ⇒ Si on ne change pas le format d'étiquettes, il reste enregistré pour les étiquettes à imprimer pour chaque cycle de stérilisation